



PHAGO'SPRAY DASR

Desinfetante hidro alcoólico para superfícies em contacto com alimentos



Valências

- ✓ Pronto-a-usar
- ✓ Largo espectro de desinfeção
- ✓ Formula com eco-certificação
- ✓ Produto sem enxaguamento

Acondicionamento

Apresentação	Código	Unidades /caixa
Garrafa 750 ml	SA0082740	6 unidades



Christeyns Portugal
Estrada de Paço de Arcos, Zoom Business Park
Edifício E, Escritório 1 2735 307 Cacém
www.phagogene.fr



PHAGO'SPRAY DAsR

Aplicação

✓ **PHAGO'SPRAY DAsR** é um desinfetante hidro-alcoólico para a desinfecção de superfícies e equipamentos limpos. Não deixa resíduos nas superfícies.

✓ **PHAGO'SPRAY DAsR** pode ser aplicado em pano de única utilização, para uma rápida «desinfecção de pequenas áreas (carrinhos de transporte, dispositivos médicos não invasivos, e superfícies perto do paciente).

✓ **PHAGO'SPRAY DAsR** pode ser utilizado, sem enxaguamento, nas superfícies que poderão estar em contato direto com alimentos (mesas, tabuas de corte, carrinhos de transporte)

Composição

- ✓ Substância ativa:
 - Etanol (CAS No: 64-17-5): 52,70% m/m
- ✓ Também contém: Água, regulador de acidez
- ✓ 99,90% dos ingredientes são de origem naturais

Características organoléticas e fisico-químicas

- ✓ Aparência: líquido transparente
- ✓ Cor: incolor
- ✓ Cheiro: álcool
- ✓ pH a 20°C (produto a puro) : 5 to 7
- ✓ Flash point: 23°C

Como utilizar

- ✓ **PHAGO'SPRAY DAsR** é pronto a utilizar.
- ✓ Pulverize num pano de utilização única e aplique sobre a superfície. Não enxague.
- ✓ Depois das superfícies limpas, pulverize a uma distância de 20-30 cm,
- Deixe atuar durante 5 minutos para uma desinfecção bactericida e virucida e 15 minutos para atividade fungicida.

Compatibilidade

- ✓ Faça primeiro um teste de compatibilidade com os material.

Precauções

- ✓ Apenas para uso profissional
- ✓ Data de Validade: 3 após data de fabrico
- ✓ Ficha de segurança disponível por solicitação

Antimicrobial activity

Normas	Concentração	Tempo
<u>BACTERICIDA</u>		
EN 1040 (<i>P. aeruginosa</i> and <i>S. aureus</i>)	100 %	5 min.
EN 1276 (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> and <i>L. monocytogenes</i>)	100 %	5 min.
EN 13727+A2 (<i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>)	80%	5 min.
EN 13697 (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> and <i>L. monocytogenes</i>)	100 %	5 min.
<u>FUNGICIDA</u>		
EN 1275 (<i>C. albicans</i> and <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 1650 (<i>C. albicans</i> and <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 13697 (<i>C. albicans</i> and <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 13624 (<i>C. albicans</i>)	80%	15 min.
EN 13624 (<i>A. brasiliensis</i>)	97%	15 min.
<u>VIRUCIDA</u>		
BVDV and Vaccinia virus	100 %	5 min.
Active on HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus VRS), Influenza A/H5N1 and Influenza A/H1N1	100 %	5 min.



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

Laboratoire
phagène®

Christeyns Portugal
Estrada de Paço de Arcos, Zoom Business Park
Edifício E, Escritório 1 2735 307 Cacém
www.phagene.fr