



PHAGOSPRAY DM

Desinfetante de base alcoólica para limpeza e desinfeção de superfícies



Valências

- ✓ Pronto-a-usar
- ✓ Desinfetante de largo espectro
- ✓ Eficaz contra víruses em 5 mins.
- ✓ Pulverizador com 2 posições (spray/stop)

Acondicionamento

Apresentação	Código	Numero de unidade/Acond
Garrafa de 750 ml	60416	6 units
Bilha de 5Lt	60414	2 units



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

phagogène®

Christeyns Portugal, S.A. • Zoom Business Park • Edif. E - Esc. 1
Est. de Paço de Arcos • PT-2735-307 Cacém
T +351 214 276 390 • F +351 214 276 399
www.phagogene.fr



PHAGOSPRAY DM

Aplicação

- ✓ **PHAGOSPRAY DM** é um agente de limpeza e desinfecção para aplicação em várias superfícies em ambientes hospitalares
- ✓ **PHAGOSPRAY DM** pode ser pulverizado nas paredes, tetos e mobiliário.
- ✓ **PHAGOSPRAY DM** pode ser aplicado com um pano para a desinfecção de uma pequena área tais como; moveis, carrinhos, dispositivos médicos que sejam utilizados em procedimentos não evasivos.

Composição

- ✓ Substância Ativa:
 - Etanol (CAS No. 64-17-5): 24% m/m
 - Cloreto de Didecildimetilamónio (CAS No. 7173-51-5): 0.14 % m/m
 - Alquilamina (CAS No. 2372-82-9): 0.25% m/m
- ✓ Aroma: uvas

Características organoléticas e físico-químicas

- ✓ Aparência: liquido transparente
- ✓ Cor: incolor
- ✓ Aroma: uva
- ✓ pH (produto a puro) a 20°C: 9.5 a 11.0
- ✓ Densidade a 20°C (g/ml): 0.968 ± 0.005

Como utilizar

- ✓ **PHAGOSPRAY DM** é um produto pronto-a-usar.
- ✓ Pulverize num pano ou aplique diretamente sobre a superfícies a desinfetar. Não enxague.*
- ✓ Deixe atuar durante 5 minutos, para atividade bactericida, ou 15 minutos, para uma atividade global do espectro.

* Nos casos em que as superfícies estão em contacto direto com géneros alimentares, enxague com água potável.

Recomendações

- ✓ Não deixo o produto escorrer.
- ✓ Não utilize em máquinas de nebulização.
- ✓ Data de validade: 3 anos após a data de fabrico.
- ✓ Ficha de dados de segurança disponível se solicitado.
- ✓ Produto para uso profissional.

Actividade anti-microbiana

Teste	Concentração	Tempo
<u>BACTERICIDA</u>		
EN 1040 (P. aeruginosa and S. aureus)	0.5%	1 min
EN 1276 clean conditions (E. coli, E. hirae, P. aeruginosa and S. aureus)	80%	15 mins
EN 13697 clean conditions (E. coli, E. hirae, P. aeruginosa and S. aureus)	100%	5 mins
EN 13697 dirty conditions (S. typhimurium)	10%	5 mins
EN 13727 dirty conditions (E. hirae, S. aureus and P. aeruginosa)	50%	5 mins
<u>FUNGICIDA</u>		
EN 1275 (C. albicans)	2.5%	15 mins
EN 13697 clean conditions (C. albicans)	100%	15 mins
EN 13624 clean conditions (C. albicans)	25%	5 mins
<u>MICOBACTERICIDA</u>		
EN 14348 clean conditions (M. avium)	50%	15 mins
<u>VIRUCIDA</u>		
EN 14476 (Rotavirus)	90%	5 mins
HIV1	100%	1 min
HBV	0.25%	10 mins
EN 14476 (Influenza A/H1N1)	80%	30 secs

Tenha cuidado quando utiliza produtos biocidas
Antes de utilizar o produto assegure-se que leu devidamente o rótulo e outra informação disponibilizada



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

phagogene®

Christeyns Portugal, S.A. • Zoom Business Park • Edif. E - Esc. 1
Est. de Paço de Arcos • PT -2735-307 Cacém
T +351 214 276 390 • F +351 214 276 399

www.phagogene.fr